



GNI SMART

РУЧНАЯ УГЛОВАЯ ОТВЁРТКА



- удобство при работе в дистальных отделах
- поворотная головка на 360°
- надёжная и долговечная конструкция



УГЛОВАЯ ОТВЕРТКА SMART SA-020 ДЛЯ УСТАНОВКИ ВИНТОВ КОМБИНИРОВАННЫМ СПОСОБОМ

Угловая отвертка Smart SA-020 является незаменимым помощником ортодентов, работающих со скелетной опорой.

Отвертка создана для обеспечения максимального удобства в работе при установке анкерных винтов в дистальных отделах и ретромолярных зонах.

Отвертка Smart SA-020 совместима с хвостовиками жал под хирургический угловой наконечник всех производителей винтов для скелетной опоры.

СВОЙСТВА УГЛОВОЙ ОТВЕРТКИ SMART SA-020

- **простая и надежная конструкция отвертки** обеспечит долгие годы эксплуатации;
- **возможность поворота головки под требуемым углом** позволит настроить работу под любой клинический случай;
- **минимальные усилия, прилагаемые пользователем при работе** в сравнении с обычной рукояткой;
- **оптимальные размеры головки** максимально удобны для работы в дистальных отделах;
- **эргономичная форма рукоятки** снижает нагрузку на кисть руки пользователя;
- **совместимость с жалами всех производителей винтов** делает отвертку универсальной;
- **малый вес отвертки** достигается за счет компонентов, изготовленных из облегченных сплавов.

Бонус: стильное сочетание розового и серебристого цветов, использованных в оформлении отвертки.



ОСНОВНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ УГЛОВОЙ ОТВЕРТКИ SMART SA-020



ВЫБОР ЖАЛ ДЛЯ ВИНТОВ SMART ANCHOR

Угловая отвертка Smart **SA-020** применяется для комбинированного способа установки:

SA-005



- жало **SA-005** для межкорневых титановых и стальных винтов **SMART ANCHOR** серий SA, SSA, SA-C, SSA-C;

SA-005 (IZ)



- жало **SA-005 (IZ)** для стальных винтов **SMART ANCHOR** серии SSA-I для ретромолярной области BS и подскулового гребня IZC.



ПОРЯДОК РАБОТЫ ГОЛОВКИ УГЛОВОЙ ОТВЕРТКИ SMART SA-020

ПОРЯДОК ФИКСАЦИИ ЖАЛ В ОТВЕРТКЕ SMART SA-020



- Выберите жало под угловой наконечник, соответствующее серии устанавливаемого винта.
- Сдвиньте защелку замка на головке вправо до упора.



- Вставьте жало хвостовиком в головку до упора.
- Сдвиньте защелку влево.
- Удостоверьтесь, что жало надежно зафиксировано в головке отвертки.

ПОРЯДОК ПОВОРОТА ГОЛОВКИ УГЛОВОЙ ОТВЕРТКИ SMART SA-020:



- Открутите резьбовой фиксатор головки против часовой стрелки.



- Поверните головку в удобное для работы положение относительно рукоятки и места установки винта.



- Закрутите резьбовой фиксатор головки по часовой стрелке.



ПОРЯДОК УСТАНОВКИ ВИНТОВ УГЛОВОЙ ОТВЕРТКОЙ SMART SA-020



ВКРУЧИВАНИЕ

- Вставьте винт головкой в шлиц жала.
- Плотно прижмите отвертку к планируемому месту установки винта, удерживая ее за шейку и рукоятку. В случае установки винта без предварительного пилотного сверления, это позволит сначала самосверлящему кончику винта, а затем и первым виткам резьбы войти в костную ткань.
- Для полного вкручивания винта, продолжайте вращать рукоятку плавными и равномерными движениями по часовой стрелке одной рукой, придерживая отвертку за шейку другой рукой.



ВЫКРУЧИВАНИЕ

- Вставьте шлиц отвертки в головку винта.
- Для выкручивания винта, плавными и равномерными движениями вращайте рукоятку одной рукой против часовой стрелки, придерживая отвертку за шейку другой рукой.



СМАЗКА, ОЧИСТКА, ДЕЗИНФЕКЦИЯ И СТЕРИЛИЗАЦИЯ УГЛОВОЙ ОТВЕРТКИ SMART SA-020

СМАЗКА УГЛОВОЙ ОТВЕРТКИ SMART SA-020



Порядок смазки для угловой отвертки Smart SA-020 такой же, как и для стоматологических наконечников:

- Рекомендуется своевременная смазка специализированными маслами для стоматологических наконечников;
- Смазку рукоятки, головки и механизма защелки можно выполнять вручную;
- Удаляйте излишки смазки.

ОЧИСТКА, ДЕЗИНФЕКЦИЯ И СТЕРИЛИЗАЦИЯ ОТВЕРТКИ SMART SA-020

Отвертка Smart SA-020 для установки винтов предназначена для многоразового использования и поставляется нестерильной.

Проводите очистку, дезинфекцию и стерилизацию приспособления перед каждым его применением.

Удалите заводскую смазку перед первой обработкой отвертки. Новые инструменты должны пройти полный процесс обработки.

Отвертка Smart SA-020 выдерживает стерилизацию в автоклаве с соблюдением указанных параметров (или в соответствии с программой используемого автоклава):

- температура 134 °C;
- продолжительность 15 минут;
- давление 3.5 бар;
- продолжительность сушки 20 минут.